



警告 安全に使用していただくために

ペリオメイトは、歯周ポケット内でパウダーを含んだエアを噴射するシステムです。気腫および菌血症を引き起こす恐れがありますので、ご使用の前に必ず、この注意をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- (1) 以下の患者には使用しないこと。
 - ①病的に深い歯周ポケット（6mm以上）、および粘膜病変のある患者。
[気腫を引き起こす恐れ]
 - ②呼吸器疾患のある患者。
 - ③重篤な消化器官潰瘍のある患者。
 - ④腎臓障害のある患者。
 - ⑤心機能障害、肺機能障害のある患者。
 - ⑥人工心臓弁、人工関節を使用している患者。
 - ⑦口腔内に傷や異常の認められる患者。
 - ⑧口腔内に充血、出血、炎症が認められる患者。
 - ⑨口腔粘膜に炎症、ただれを起こしやすい患者。
 - ⑩アレルギー体質の患者。
- (2) 以下の患者に対する深い歯周ポケットへの使用はしないこと。[菌血症の恐れ]
 - ①心内膜炎のある患者。
 - ②妊娠中・授乳中の患者。
 - ③伝染病の患者。
 - ④免疫不全症（好中球減少症、顆粒球減少症、無顆粒球症、糖尿病、血友病）の患者。
 - ⑤放射線治療中、化学療法治療中、抗生物質投与中の患者。
- (3) 過大な給気圧力は気腫を引き起こす恐れがあります。
- (4) ノズルチップ先端を歯周ポケット底に当てたまま噴射すると、気腫を引き起こす恐れがあります。
- (5) 歯肉縁下根面のスケーリング処置直後に同一部位へ本製品を使用すると、菌血症を引き起こす恐れがあります。
- (6) パウダーはペリオメイトパウダーをご使用ください。他のパウダーを使用するとノズルチップが損傷しセメント質および象牙質にダメージを与えたり、気腫を引き起こす恐れがあります。

ご使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読みください。